



# Richtiger Umgang mit Mund-Nasen-Behelfschutz (MNS) Masken



Mund und Nase mit der Maske bedecken,  
farbige Seite außen  
(wenn vorhanden)



Bänder hinter den  
Ohren befestigen



Während des Tragens Maske  
nicht mit den Händen berühren



Maske an den Bändern an der Seite  
(von hinten nach vorne) vom Gesicht  
nehmen, Maske dabei nicht berühren



Hände mindestens 30 Sekunden  
mit warmem Wasser und Seife waschen

MNS-Masken verhindern, dass beim Husten, Niesen und auch beim Sprechen Speicheltröpfchen großflächig verteilt werden. **Sie schützen also nicht den Träger vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, sondern die Vermeidung der Weitergabe an andere Personen.**

Grafiken: ORF.at

**Barbara Mandl**

Eicht 10

7441 Bubendorf

Tel: +43 650 3308908

Mail: [stoffalarm@outlook.com](mailto:stoffalarm@outlook.com)

Web: [stoffalarm.jimdo.com](http://stoffalarm.jimdo.com)

FB: [facebook.com/stoffalarm](https://www.facebook.com/stoffalarm)

Hinweis:

Durch den Nasenbügel kann der Behelfsschutz besser an die Nasenkontur angepasst werden.

Am unteren Rand befindet sich ein Schlitz, in dem eine zusätzliche Einlage (zB Taschentuch, ...) eingebracht werden kann.

Die Masken sind maschinenwaschbar.

